

## **ENEKA PRO 5000 que acarician la piel**

Con una potencia de 5000 watos, nuestro equipo se adapta a cada caso de manera personalizada, permitiendo los mejores resultados desde la primera sesión, maximizando la seguridad y eficacia del tratamiento en todos los fototipos de piel, durante todas las épocas del año.

Tecnología 100% española que cumple con las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 13485.

### **¿Cómo actúa ENEKA PRO?**

Siguiendo el principio de fototermólisis selectiva, transforma la luz emitida en calor para destruir las células germinativas del folículo piloso de forma selectiva, La melanina, sustancia que da color al pelo, absorbe la luz láser emitida y la transforma en calor, produciendo la desnaturalización del bulbo del pelo sin afectar a los tejidos cercanos.

### **¿Qué beneficios tiene?**

La innovadora tecnología que incorpora ENEKA PRO DIODE LASER permite los mejores resultados en depilación desde la primera sesión, maximizando la seguridad y eficacia del tratamiento. ENEKA PRO DIODE LASER mejora la calidad de la piel ayudando a eliminar el pelo enquistado y mejorando problemas tales como la foliculitis.

### **¿Es seguro?**

Sí, siempre que se realice por personal cualificado y debidamente formado. La tecnología ALL TYPES desarrollada por TERMOSALUD permite generar y controlar la energía de forma personalizada.

ENEKA PRO es eficaz en todos los tonos de piel, sea cual sea el tipo y densidad del pelo, en cualquier época del año. Su innovador software evita errores accidentales.

### **¿Cuántas sesiones son necesarias?**

El número de sesiones dependerá de la zona, color y grosor del pelo, tipo de piel y características específicas de cada paciente.

El tratamiento requiere varias sesiones, ya que siempre hay que actuar en el pelo en la fase anágena o de crecimiento y éste es mayor o menor según las diferentes zonas corporales.

### **¿Cuánto dura cada sesión?**

Depende del modo de trabajo FDHR o DHR y la extensión de la zona a tratar. Puede variar desde 5 minutos para un labio superior, a 15 minutos en las axilas o 40-50 minutos para piernas completas.

### **¿Es definitiva la depilación con ENEKA PRO?**

El equipo incluye una innovadora tecnología que consigue excelentes resultados en la reducción permanente del pelo y se adapta a las condiciones y necesidades de cada persona. La depilación con ENEKA PRO DIODE LASER elimina de forma permanente los folículos activos en las sucesivas sesiones.

### **¿Es un tratamiento doloroso?**

Su avanzado sistema de refrigeración mantiene fría la punta del cabezal y, en consecuencia, la zona de tratamiento, haciendo innecesario el uso de anestesia. ENEKA PRO DIODE LASER consigue minimizar el dolor y proteger la piel para que el tratamiento sea más agradable y altamente tolerado por el paciente.

### **¿Qué recomendaciones hay que seguir antes y durante el tratamiento?**

En los días previos al tratamiento, el paciente debe evitar la exposición al sol y la utilización de autobronceadores o decolorantes del pelo. Se recomienda utilizar protección total en la zona depilada durante los primeros días tras el tratamiento y no usar cualquier otro sistema de depilación que elimine el pelo de raíz desde el inicio del mismo.

### **¿Cuáles son sus efectos secundarios?**

El tratamiento con ENEKA PRO DIODE LASER minimiza los riesgos que son reversibles en un corto espacio de tiempo: enrojecimientos cutáneos, eritema residual o edema perifolicular, que desaparecen tras 24/72 horas si se siguen las indicaciones del técnico.